

Modalità di prelievo e consegna dei campioni di sangue per il test del gamma-interferon per la diagnosi di Tuberculosis Bovina

1. I prelievi possono essere effettuati su tutti i capi dell'azienda con età superiore ai tre mesi.
2. Prelevare da ogni animale il campione di sangue dalla vena giugulare in provetta tipo "**vacutainer**" contenente **Litio o Sodio Eparina**. Il volume deve essere di almeno 5 ml per provetta. Prima di riporre la provetta, invertirla delicatamente più volte in modo che l'anticoagulante si distribuisca in tutto il campione di sangue.
3. Il campione deve essere consegnato, dopo prenotazione telefonica, direttamente al Laboratorio di Biochimica Clinica dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Brescia entro 8 ore dal prelievo e non più tardi delle ore 14.00, da lunedì al giovedì.
4. Durante il trasporto i campioni devono essere tenuti a temperatura ambiente.