



Centro di Riferenza Nazionale per la tubercolosi da *M.bovis*

Modalità di prelievo e consegna dei campioni di sangue per il test del gamma-interferon per la diagnosi di Tubercolosi Bovina

1. Il laboratorio di riferimento Europeo (EURL) raccomanda che i prelievi siano preferibilmente effettuati su capi di età **superiore ai sei mesi**. E' quindi opportuno limitare il prelievo dei soggetti di età compresa tra le 6 settimane ed i 6 mesi agli stabilimenti sede di focolaio.
2. Prelevare da ogni animale un campione di sangue dalla vena giugulare utilizzando una provetta tipo "**vacutainer**" **contenente Litio o Sodio Eparina**. Il volume deve essere di **almeno 5 ml per provetta** e comunque sufficiente ad eseguire la prova presso il laboratorio designato. Prima di riporre la provetta, capovolgerla delicatamente più volte in modo che l'anticoagulante si distribuisca in tutto il campione di sangue.
3. I campioni vanno numerati e consegnati accompagnati da un documento che riporti l'identificazione completa degli animali sottoposti a campionamento ed il motivo del prelievo. Si consiglia di usare la scheda SANAN scaricabile dal portale vetinfo.it
4. I campioni devono essere consegnati direttamente al laboratorio che svolge la prova in modo da poter iniziare l'analisi entro le 8 ore dal prelievo e comunque non oltre le 24 ore.
5. Durante il trasporto I campioni devono essere tenuti a temperatura ambiente (**18-25°C**), evitando di esporli a temperature estreme.
6. La prova si esegue previa prenotazione presso il laboratorio incaricato della prova.

Indicazioni specifiche per la consegna dei campioni di sangue a IZSLER

7. IZSLER esegue il test del gamma-interferon esclusivamente presso la Sede Centrale di Brescia.
8. La prova si esegue previa prenotazione (tel. 030 2290-273/308), dal lunedì al giovedì, con consegna non oltre le 13:30.
9. I campioni vanno recapitati presso il Reparto di Accettazione Centralizzata della Sede Centrale IZSLER di Brescia.